



**POLYMEDICAL  
DE COLOMBIA S.A.S.**  
NIT. 900.015.175 - 0 RÉGIMEN COMÚN



FICHA TECNICA	
Importador	<b>POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S</b>
Dirección: Transversal 76 # 46 - 21	
Ciudad: Bogotá - Colombia	
Email: polymedicaldecolombia@gmail.com	
Elaboró:	Teléfono : 2631081-6042996
Dirección técnica	

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
NOMBRE DEL PRODUCTO	<b>TAPABOCAS DESECHABLES DE ELASTICO 3 CAPAS AZUL</b>	CODIGO:	TAP 001-A
DESCRIPCION:	Los tapabocas <b>HANDEL MED</b> tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.		
USOS:	Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.		
PRESENTACION	Display que contiene 50 unds. Caja de carton corrugado que contiene 40 Displays		

COMPOSICIÓN	
COMPONENTE	FUNCION
<i>CUERPO DEL TAPABOCA</i>	Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.
<i>ELASTICOS DE SUJECCION</i>	Cada tapabocas cuenta con 2 Elasticos una con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario.
<i>SOPORTE NASAL</i>	Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.

PROPIEDADES FISICAS					
<b>MATERIAL</b>	Tela no tejida	<b>COLOR</b>	Azul	<b>DIMENSIONES</b>	Ancho: 9,5 cm Largo: 17,5 cm
<b>GRAMAJE</b>	3,6 +/- 0,3g	<b>REG SANITARIO</b>	2020DM-0022516	<b>MARCA</b>	<b>HANDEL MED</b>
<b>OTROS</b>					

PRESENTACION				
EMPAQUE	DESCRIPCION	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES
Comercial	Display	Cartón plastificado	18 x 10 x 10,5 Cm	50 Tapabocas
Embalaje	Caja	Cartón corrugado	52 x 38 x 44 Cm	2000 Tapabocas

INSTRUCCIONES DE USO
1) Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo.
2) El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente nariz y boca.
3) Coloque los Elasticos de Sujecion detrás de las Orejas
4) Coloque los dedos de ambas manos sobre el soporte nasal (tira de metal en la parte superior del cuerpo del tapabocas). Moldee el ajustador alrededor de su nariz mediante el movimiento de los dedos a ambos lados del metal.
5) El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre.
No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad
Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar en el usuario.
Permite respiración normal.
Prácticos empaques que generan mayor asepsia y facilitan el manejo y uso del producto. Display resistente que garantizan protección al producto y cuenta con sistema que facilita la extracción de los tapabocas sin tocar ni ensuciar el resto del contenido
No es tóxico